

 	TGL. PEMBUATAN	Februari 2024
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	
	DI SAHKAN OLEH	
		

**KEMENTERIAN KESEHATAN RI BADAN
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN ACEH**

**INSTRUKSI KERJA: PENGOPERASIAN ALAT TEST
DARAH EASY TOUCH**

1. Tujuan

Instruksi kerja ini digunakan sebagai panduan bagi pihak yang terkait dalam pengoperasian alat test darah Easy Touch

2. Lingkup Kerja

Instruksi kerja ini meliputi prosedur instalasi cara pengoprasian dan pembersihan alat test darah Easy Touch

3. Keterampilan/Pelatihan Yang Dibutuhkan Untuk Melaksanakan Layanan Jasa(Optional)

CI/Teknisi laboratorium sudah memiliki keterampilan pengoprasian alat test darah Easy Touch

4. Dokumen Yang Terkait :

- Manual book

5. Langkah-Langkah Kerja Pelaksanaan Layanan

Persiapan

Pengoperasian Alat Test Darah Easy Touch

- Masukan baterai & nyalakan alat.
- Set jam, tanggal & tahun pada alat.
- Ambil chip warna kuning masukan ke dalam alat untuk cek alat.
- Apabila pada layar muncul "ERROR" artinya alat rusak.
- Apabila pada layar muncul "OK" artinya alat siap dipakai.
- Setiap botol strip pada gula darah, asam urat & kolesterol terdapat chip test.
- Gunakan chip HB untuk test HB & chip kolesterol untuk test kolesterol, Chip gula untuk test Gula.
- Pada layar akan muncul angka/kode sesuai pada botol strip.
- Setelah itu akan muncul gambar tetes darah & kedip-kedip.
- Masukan jarum pada lancet/alat tembak berbentuk pen & atur kedalaman jarum sesuai nomor.
- Gunakan tisu alkohol untuk membersihkan ujung jari anda.
- Tembakkan jarum pada ujung jari & tekan supaya darah keluar.
- Darah disentuh pada tepi samping strip & bukan ditetes diatas tengah strip alat test darah Easy Touch.

- 14) Sentuh pada bagian garis yang ada tanda panah.
- 15) Darah akan langsung meresap sampai ujung strip & bunyi beep.
- 16) Tunggu sebentar, hasil akan keluar beberapa detik pada layar.
- 17) Cabut jarumnya dari lancing juga stripnya & buang.
- 18) Chip di simpan ke botol lagi.
- 19) Tutup rapat botol strip apabila tidak dipakai.
- 20) Perhatikan masa expired / kadaluarsa pada setiap strip.

6. Perawatan:

- 1) Pastikan alat dalam keadaan mati (off) sebelum dibersihkan
- 2) Basahi sedikit kapas, kain lembut, atau tisu dengan alkohol 70%.
- 3) Bersihkan bagian luar atau bodi layar dan tombol dari sisa debu atau noda darah.
- 4) Hindari menyemprotkan cairan langsung ke alat atau memasukkan cairan ke dalam lubang slot strip untuk mencegah kerusakan mesin.
- 5) Lepaskan jarum (lancet) dari pena penusuk (lancing device) setelah digunakan.
- 6) Buang jarum bekas ke tempat sampah medis atau wadah tertutup yang aman (tidak mudah tembus) agar tidak melukai orang lain.
- 7) Jika alat tidak akan digunakan dalam waktu lama (misalnya lebih dari 2 minggu), lepaskan baterai dari perangkat agar tidak mengalami kebocoran yang merusak mesin.
- 8) Masukkan alat beserta perlengkapannya ke dalam tas/kotak penyimpanan aslinya.
- 9) Simpan pada suhu ruangan yang sejuk (ideal antara -10°C hingga 60°C dan hindari paparan sinar matahari langsung.
- 10) Pastikan wadah strip tes tertutup rapat dan simpan di tempat sejuk agar masa simpannya tidak terganggu.